

# Produits Kodak\*

## Produits Kodak pour le développement manuel

Produit	Développement	Prêt à l'emploi ou concentré
Monobain dentaire	Développement : 4 – 8 min. 20 °C (4 min. minimum, 8 min. recommandées) Lavage : 10 min. 20 °C	Prêt à l'emploi
Révéléateur Rapid Access	Développement : 15 sec. 20 °C	Prêt à l'emploi
Fixateur Rapid Access	Fixage : 30 - 60 sec. 20 °C Lavage : 1-2 min. 20 °C (pour l'archivage, refixez et rincez comme indiqué)	Prêt à l'emploi
Révéléateur dentaire	Développement : 6 min. 18°C 5 min. 20°C 4 min. 22°C 3 min. 24°C Rinçage : 30 s. à l'eau courante	Concentré : nécessite une dilution ; suivre les instructions figurant sur le produit. Préparer tout le contenu de la bouteille en une fois, pour éviter au restant de révélateur ou de fixateur concentré de s'oxyder
Fixateur dentaire	Fixage : 10 min. 20°C Lavage : 10 min. 20°C	Concentré : nécessite une dilution ; suivre les instructions figurant sur le produit

## Produits Kodak pour le développement automatique

Produit	Développement	Prêt à l'emploi
Révéléateur Dental Readymatic	Voir le manuel de la machine à développer	Prêt à l'emploi/ Pour toutes les machines à développer dentaires
Fixateur Dental Readymatic	Voir le manuel de la machine à développer	Prêt à l'emploi/ Pour toutes les machines à développer dentaires

\*Vérifiez la disponibilité dans votre région auprès du distributeur. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.