

# Traitement des instruments dynamiques



DAC Universal  
(Nitram / W&H France / Sirona)

Nettoie, lubrifie et stérilise  
en moins de 30 minutes

Instruments  
non emballés



1. Placer les instruments sur le support

18 secondes pour  
6 instruments



2. Placer le support sur la console

6 secondes



3. Appuyer sur  
la touche de  
démarrage

1 seconde



4. Appuyer sur  
l'anneau bleu

1 seconde



5. Le support descend automatiquement dans la cuve

35 secondes



6. Traitement  
complet cuve  
fermée

26 minutes 50 secondes  
(Cycle Prion)



7. A la fin du cycle,  
le support remonte  
de quelques  
centimètres

10 secondes



8. Appuyer sur la  
touche C

1 seconde



9. Le support remonte complètement

20 secondes



10. Retirer le support de la colonne

8 secondes

Placer les instruments en position verticale

Attendre qu'ils refroidissent

10 minutes

# Durée totale entre deux utilisations

**38 minutes 30 secondes**